



OPASTER'ANIOS

TIRAS DE CONTROL - TIRAS DE CONTROLO

INDICACIONES

50 tiras reactivas específicas para el control de la concentración de ortoftaldeído en la solución de OPASTER'ANIOS.

INDICAÇÕES

50 tiras reativas específicas para o controlo da concentração de ortoftaldeído na solução de OPASTER'ANIOS.

MODO DE EMPLEO

Remojar la tira durante un segundo.

Eliminar el exceso de solución agitando ligeramente la tira.

Leer el resultado 60 segundos después del remojo. Respetar el tiempo antes de la interpretación.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Embeber a tira durante um segundo.

Eliminar o excesso de solução agitando ligeiramente a tira.

Leia o resultado 60 segundos depois de embeber. Respetar o tempo antes de interpretar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar el envase cerrado entre 4 °C y 30 °C en un entorno seco durante 24 meses. Conservar protegido de la luz y la humedad.


Si se respetan estas condiciones, las tiras pueden utilizarse hasta 90 días después de la apertura.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM

Conservar o frasco fechado entre +4°C e +30°C num local seco durante 24 meses. Conservar ao abrigo da luz e da humidade.


Se as condições forem respeitadas, as tiras são utilizáveis até 90 dias depois da abertura.

**Rosa uniforme
CONFORME**

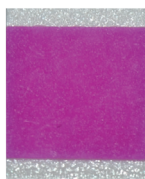

**Rosa uniforme
CONFORME**

**Rosa no uniforme
NO CONFORME**

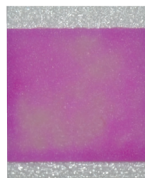

**Rosa não uniforme
NÃO CONFORME**



Laboratoires

ANIOS

Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin

59260 Lille-Hellemmes - France

Tel. +33 3 20 67 67 67 - Fax: + 33 3 20 67 67 68

www.anios.com

EP100110-151127