

SURFANIOS

SURFANIOS LIMÓN

Detergente desinfectante
suelos y superficies



- Productos de referencia comercializados desde 1990
- Productos que combinan las acciones detergente y desinfectante en una operación simultánea
- Eficacia demostrada en bacterias y humedades aisladas del entorno hospitalario
- Activo contra Legionella pneumophila
- Productos formulados sin aldehído

INDICACIONES

Limpieza y desinfección de suelos, paredes y material médico.

CARACTERÍSTICAS

- Solución límpida de color azul-verde con agradable perfume
- Se utiliza en agua fría o caliente (hasta +60°C)
- Gran compatibilidad con los materiales y revestimientos de superficie: pH cercano a la neutralidad a la disolución de empleo
- pH del producto puro: aprox. 12
- pH del producto disuelto: aprox. 8,5
- No corrosivo (ausencia de oxidante)

PRODUCTO
A DILUIR
20 ml > 8 L



0,25%




SURFANIOS

SURFANIOS LIMÓN

Detergente desinfectante suelos y superficies

MODO DE EMPLEO

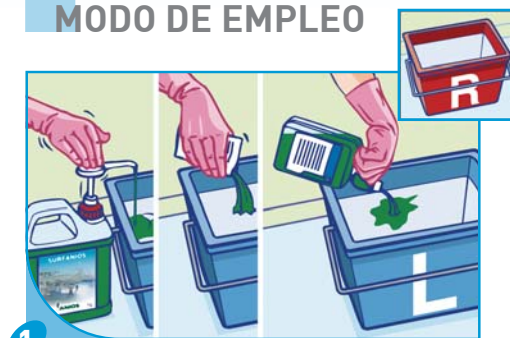

1 Llenar un recipiente de lavado y un recipiente de aclarado con 8 litros de agua.
Disolución al 0,25% : Verter una dosis de 20 ml de SURFANIOS en el recipiente de lavado.



2 Proceder al lavado respetando el esquema de limpieza: desde el fondo hasta la salida. No aclarar la superficie.



3 Aclarar y secar la bayeta antes de introducirla en el recipiente de lavado. (El carrito de la limpieza no debe estar dentro de la estancia sino en el pasillo).

COMPOSICIÓN

N-[3-aminopropil]-N-dodecilpropano-1,3-diamina – CAS N° 2372-82-9 (51 mg/g), cloruro de didecildimetilamonio – CAS N° 7173-51-5 (25 mg/g), excipientes.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Peligroso. Respetar las precauciones de uso (establecidas según la Directiva 99/45/CE y sus adaptaciones) Utilizar los biocidas con precaución. Antes de su utilización, leer la etiqueta y la información relativa al producto. Almacenar entre +5°C y +35°C.

Biocida para la desinfección de superficies (Grupo 1 - TP2) Uso profesional.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Activo en	Normas	Tiempo de contacto
Bacterias	EN 1040, EN 13727, EN 1276, T 72-300 (BMR)	5 minutos
	T 72-300 (L. pneumophila)	15 minutos
Mycobacterias	M. terrae (EN 14348, EN 14563)	30 minutos/ 0,5%
	M. terrae (EN 14348, EN 14563)	60 minutos/0,25%
Levaduras	EN 1275, EN 1650	5 minutos
	EN 13624	15 minutos
Mohos	EN 1275, T 72-300 (A. niger, A. fumigatus)	15 minutos
	EN 13624	60 minutos
Virus	HIV-1, BVDV (virus modelo HCV), PRV (virus modelo HBV), virus Influenza A (H ₁ N ₁)	5 minutos

ACONDICIONAMIENTOS

SURFANIOS

- 1 500 bolsitas de 20 ml.....Ref. 350.129
- 2 12 frascos de 1 litro con dosificador.....Ref. 350.092
- 3 4 bidones de 5 litros con 1 bomba dosificadora de 20 ml.....Ref. 350.036

SURFANIOS LIMÓN

- 500 bolsitas de 20 ml.....Ref. 347.129
- 12 frascos con dosificador de 1 litro.....Ref. 347.092
- 4 bidones de 5 litros con 1 bomba dosificadora de 20 ml.....Ref. 347.036

